

Dynamiczne Wkładki Ortopedyczne FootWave**KIDS, KIDS SUPI, KIDS SUPI ¾, KIDS SUPI PRO, PŁASKOSTOPIE, OSTROGA PIĘTOWA, SUPPORT, SUPPORT ¾, HALLUX, PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE, VERSA MAN, LADY VERSA, LADY PREGNA, LADY HIGH HEEL, SPORT, SOFTY, FOOTBALL, PLAY**

Należy uważnie zapoznać się z treścią instrukcji przed korzystaniem z produktu, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Produkt ten należy zawsze używać dokładnie tak, jak to opisano w instrukcji dla pacjenta, lub według zaleceń specjalisty.

- Należy zachować tę instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Przed zastosowaniem wkładek FootWave zalecane jest skorzystanie z konsultacji specjalisty oraz wykonanie badania stóp i chodu lub biegu (w zależności od zastosowania).
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane należy powiedzieć o tym specjalście.
- Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się ze specjalistą.

1. Czym są Dynamiczne Wkładki Ortopedyczne FootWave i w jakim celu się je stosuje

Dynamiczne Wkładki Ortopedyczne FootWave to wyrób medyczny, którego specjalnie zaprojektowana konstrukcja przywraca anatomiczne wysklepienie łuków podszwowych i prawidłową ścieżkę przetaczania stopy. Zapewnia wsparcie i kontrolę stóp podczas całego cyklu chodu. Stanowi również skuteczną profilaktykę problemów stóp i podnosi komfort poruszania się na co dzień. Szczegółowe informacje dotyczące wskazań, budowy i działania wybranego modelu dynamicznych wkładek ortopedycznych znajdują się na opakowaniu.

2. Jak przechowywać oraz czyścić Dynamiczne Wkładki Ortopedyczne FootWave

Wkładki należy przechowywać w suchym miejscu, z daleka od źródła ciepła oraz promieni słonecznych, w temperaturze pomiędzy 5-40 stopni Celsjusza.

Wkładki można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki nasączonej mydłem lub delikatnym detergentem. Nie należy ich moczyć, wkładać do pralki, suszarki, suszyć na kaloryferze lub w bezpośredniej bliskości innego źródła ciepła oraz wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.

Aby zachować pełną funkcjonalność oraz bezpieczeństwo używania produktu należy czyścić oraz przechowywać wkładki zgodnie z powyższą instrukcją.

3. Jak korzystać z Dynamicznych Wkładek Ortopedycznych FootWave

Należy bezwzględnie przestrzegać poniższych wytycznych:

- Należy używać wkładek zgodnie z ich przeznaczeniem wskazanym na opakowaniu. W przypadku występowania jakichkolwiek dolegliwości lub schorzeń towarzyszących, które nie są wyszczególnione na opakowaniu, lub w przypadku zamiaru korzystania z wkładek w specyficznych warunkach (innych, niż codzienne przemieszczanie się) należy bezwzględnie skonsultować się ze specjalistą.
- Należy usunąć fabryczne wkładki z butów przed włożeniem wkładek FootWave. Jeśli nie jest to możliwe, należy upewnić się, czy fabryczna wkładka lub wyściółka jest płaska oraz czy obuwie pozwala na wystarczające dopasowanie objętości stopy (np. sznurówki). Nie wolno korzystać z wkładek FootWave, gdy nie da się usunąć wkładki fabrycznej i jest ona profilowana (nie dotyczy modeli: SOFTY, LADY HIGH HEEL).
- Należy przyzwyczajać stopy do wsparcia ich łuków używając wkładek przez kilka godzin dziennie, stopniowo zwiększając czas używania, aż do osiągnięcia pełnego komfortu.
- Nie należy stosować wkładek z widocznymi uszkodzeniami lub zużytych.
- Nie zaleca się korzystania z wkładek FootWave w bezpośrednim kontakcie ze skórą, zalecane jest korzystanie ze skarpetek lub podobnej ochrony.

4. Rozmiar i dopasowanie do obuwia

Aby zapewnić prawidłowe działanie, skuteczność i komfort korzystania z wkładek FootWave, należy przestrzegać zasad dotyczących doboru rozmiaru i dopasowania wkładek do obuwia:

- Rozmiar wkładek powinien być dobrany zgodnie z tabelą oraz etykietą rozmiarową, które znajdują się w górnej części opakowania. Rozmiary obuwia podane są w rozmiarówce europejskiej. Rozmiar wkładki powinien być dobrany na podstawie długości stopy. Nie należy dobierać rozmiaru wkładki na podstawie najczęściej używanego rozmiaru obuwia ze względu na częste różnice w rozmiarówce między producentami obuwia. Tabela rozmiarów wskazująca jaki rozmiar obuwia odpowiada jakiej długości stopy znajduje się na karcie produktu każdego modelu wkładek na stronie internetowej www.footwave.pl, pod linkiem "Tabela rozmiarów" obok okienka wyboru rozmiaru.
- Wkładki FootWave mogą zostać przycięte w celu dopasowania rozmiaru do obuwia (nie dotyczy modeli: PŁASKOSTOPIE POPRZECZNE, KIDS SUPI ¾, SUPPORT ¾, LADY HIGH HEEL, SOFTY). Wkładki można przycinać tylko i wyłącznie w zakresie rozmiarów obuwicznych wskazanych na etykiecie rozmiarowej produktu. Wkładki należy przycinać tylko i wyłącznie od strony przodostopia. Przycinając wkładki nie wolno uszkodzić amortyzatorów przodostopia (padów). Dobrą praktyką jest przycinanie wkładek zgodnie z kształtem przodostopia wkładki fabrycznej w obuwiu.
- Przycięte wkładki FootWave nie podlegają zwrotowi, a przycięcie nie może stanowić przedmiotu reklamacji.

Wkładki FootWave należy używać w obuwiu:

- o odpowiednim rozmiarze, obuwiu z umieszczoną wkładką FootWave nie może być za małe (nie może uciskać stopy), ani za duże (nie wolno dopuścić, aby wkładka posiadała luz w obuwiu i poruszała się w sposób niekontrolowany),
- zamkniętym, nie należy korzystać z wkładek w sandałach, kłapkach, itp.,
- o elastycznej podeszwie, gruba i sztywna podeszwa będzie negatywnie wpływać na działanie wkładki i producent nie może zapewnić pełnego komfortu oraz skuteczności w takim obuwiu,
- posiadającym zapiętek,
- płaskim (nie dotyczy modeli: LADY VERSA, VERSA MAN, LADY HIGH HEEL), maksymalne, dopuszczalne uniesienie tyłostopia to 2 cm.

UWAGA! Ze względu na wymiary własne wkładek ortopedycznych możliwe jest, iż wymagane będzie użycie obuwia o większym rozmiarze obuwicznym, niż dotychczas wykorzystywany przez Pacjenta! Może to powodować konieczność nabycia nowego obuwia przez Pacjenta.

UWAGA! Ze względu na różnorodność form i kształtów obuwia dostępnego powszechnie na rynku, marka FootWave nie jest w stanie zapewnić idealnego dopasowania do wszystkich dostępnych rodzajów butów, szczególnie, jeśli posiadają specyficzne zastosowanie, wymiary, są zwięzane czy wytworzone na specjalne zamówienie. Producent nie gwarantuje możliwości dopasowania wkładek FootWave do każdego rodzaju obuwia. Brak możliwości dopasowania wkładek FootWave do wybranego modelu obuwia nie stanowi jakiegokolwiek wady i nie jest podstawą do reklamacji. Wkładki FootWave pasują do większości klasycznego obuwia typu sportowego, tenisówek, sneakersów, obuwia zimowego, wyjściowego i innych popularnych kategorii.



5. Możliwe działania niepożądane

Wykazano, że Dynamiczne Wkładki Ortopedyczne FootWave nie powodują żadnych działań niepożądanych. W przypadku zauważenia pogorszenia komfortu lub wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości podczas prawidłowego korzystania z wkładek należy zaprzestać korzystania z produktu i skontaktować się ze specjalistą.

6. Przeciwwskazania do korzystania z wkładek

Uczulenie na którykolwiek z materiałów użytych do produkcji wkładek (informacja o użytych materiałach znajduje się na opakowaniu)

7. Zużycie wkładki

Czas zużycia produktu jest uzależniony od wielu czynników, w tym od: intensywności i czasu korzystania, rodzaju obuwia, wagi pacjenta, rodzaju aktywności, stopnia zaawansowania schorzeń, dolegliwości, deformacji stóp oraz innych czynników.

W związku z powyższym, nie jest możliwe precyzyjne określenie przewidywanego czasu zużycia, gdyż będzie on się znacząco różnił pomiędzy pacjentami. Ze względów higienicznych producent sugeruje wymianę wkładki na nową nie rzadziej, niż raz na rok.

Zużycie wkładki można rozpoznać po: jej trwałym odkształceniu, nadmiernym starciu lub odklejaniu się materiału wierzchniego (wyściółki), znaczącym zabrudzeniu nie dającym się wyczyścić.

Nie należy korzystać ze zużytych wkładek. Zużycie się wkładki nie stanowi jej wady, a uszkodzenia eksploatacyjne nie są podstawą do reklamacji.

8. Zawartość opakowania i inne informacje

W opakowaniu znajduje się:

- instrukcja korzystania z Dynamicznych Wkładek Ortopedycznych FootWave
- ulotka zawierająca informacje o produktach FootWave
- para Dynamicznych Wkładek Ortopedycznych FootWave (lewa wkładka + prawa wkładka) w wybranym rozmiarze

Podmiot odpowiedzialny (producent i wyłączny dystrybutor):

FootMedical Aneta Słoma
Chwaszczyńska 170C/24
81-571 GDYNIA
VAT-PL: 584-106-83-12
biuro@footmedical.pl

Data ostatniej aktualizacji instrukcji – 03.2023

